

neodisher® IP Spray



Aditivo líquido especialmente indicado para el mantenimiento y conservación del instrumental de acero.

Propiedades

Conservación del instrumental de acero y otros metales.

Campos de aplicación

Hospitales, clínicas, ambulatorios, laboratorios farmacéuticos, veterinaria, etc.

neodisher® IP Spray

Es un producto en aerosol compuesto a base de parafina médica, indicado para su utilización en spray. Los depósitos de **neodisher® IP Spray** no se acumulan en las superficies aceradas ni se cristalizan durante el proceso de esterilización.

Gracias a su composición, **neodisher® IP Spray** está indicado en el mantenimiento del instrumental quirúrgico antes de la esterilización, pues no interviene en la persistencia de gérmenes debido a la película de parafina tan delgada que deja en la superficie del acero. Durante el siguiente lavado, esta película es eliminada totalmente, siendo necesario tratar el instrumental nuevamente con neodisher® IP Spray en cada lavado y/o desinfección.

neodisher® IP Spray forma una fina película de parafina lubricante tanto en las superficies aceradas como en los ejes de giro, puntos de unión, bisagras, etc., evitando que aparezca la corrosión. El grosor de esta fina película no impide la posterior esterilización del instrumental.



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 – Fax: 981576013
Apto. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO
info@gallesteril.com

