



Detergente alcalino suave en polvo para uso en lavadoras automáticas.

Principales campos de aplicación. Limpieza mecánica de instrumental quirúrgico, material de anestesia, vidrio de laboratorio, placas de Petri, biberones y otros utensilios médicos y de laboratorio.

Características: **neodisher MA** tiene una formulación alcalina suave, y elimina sangre, proteína, nutrientes, residuos de papilla y productos químicos de superficies de todos los tipos. **neodisher MA** ofrece un alto grado de protección del material, siendo apropiado para prácticamente todos los materiales utilizados en las áreas antes mencionadas, tales como cristal, acero inoxidable, aluminio, aleaciones Al-Mg, superficies cromadas plateadas y la mayor parte de los plásticos, así como los productos utilizados en la fabricación de los materiales de anestesia.

Aplicación y dosis: 3-4 g/l utilizando apropiados sistemas de dosificación ó añadido manualmente. La solución de **neodisher MA** debe ser aclarada completamente con abundante agua.

Datos técnicos: Densidad: 915-965 g/l
pH rango (determinado en agua desionizada, 20°C) 3-4 gr/l: 11,2-120
Factor titración: 0,44 (de acuerdo con el método de titración de neodisher)

Ingredientes: < 5% tensoactivos no iónicos, enzimas
>30% fosfatos
otros componentes: silicatos

Almacenamiento: Mantener el recipiente cerrado. Producto sensible a la humedad.
Caducidad: 2 años.

Riesgos y seguridad: Clasificación y marcado conforme a las Reglamentaciones de Substancias Peligrosas y las Directivas de la Unión Europea.
Símbolo de peligro C-Corrosivo
Metasilicato sódico sólido < 10%

Información de riesgos:

- R-34 Causa quemaduras

Información de seguridad:

- S2 Mantener fuera del alcance de los niños
 - S22 no aspirar el polvo
 - S26 En caso de contacto con los ojos, aclarar inmediatamente con agua y consultar al médico
 - S28 En caso de contacto con la piel, aclarar con abundante agua.
 - S37/39 Usar guantes y gafas protectoras.
- S45 En caso de accidente o malestar, consultar inmediatamente con su médico (mostrarle la etiqueta si es posible).

Referencia y presentación: 410776 – Cubo de 10 kg..



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 – Fax: 981576013
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com

