




# FICHA TECNICA

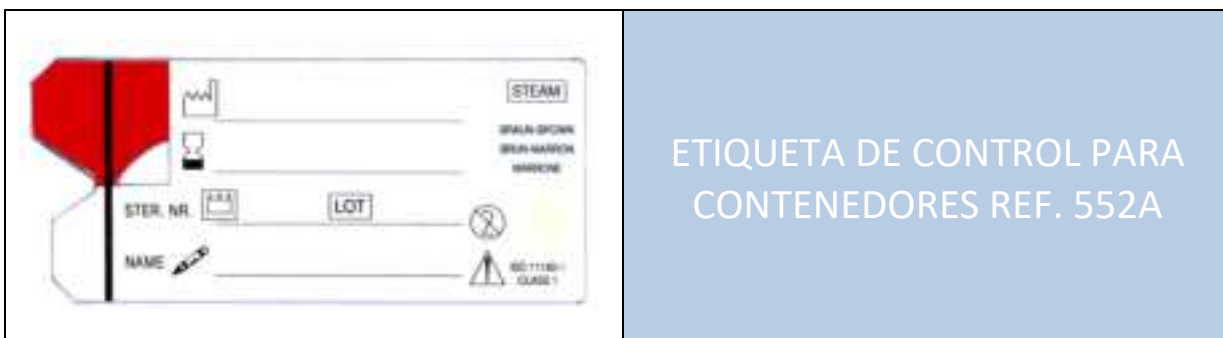

ETIQUETA DE CONTROL PARA  
CONTENEDORES REF. 552A

TIPO	Etiqueta adhesiva con indicador químico de proceso para vapor
DIMENSIONES	TOTALES: 80 x 35 mm. S. REACTIVA: 0,5cm2
REF. Y PRESENTACIÓN	REF. 552A – Envase de 500 uds.
COMPOSICION	Soporte de cartulina autoadhesiva con propiedades físicas y químicas controladas (porosidad, pH, composición de pastas, etc.) Tintas de impresión no tóxicas conforme con la norma EN 867-1 para indicadores de proceso Clase A. Superficie reactiva sensible al proceso de esterilización.
UTILIZACIÓN	Para control de proceso de esterilización en contenedores de instrumental quirúrgico y como precinto de seguridad para los cierres de contenedores Aesculap.
CALIBRACIÓN	Mediante esterilizadores de vapor siguiendo lo descrito en la norma EN 867-1 e ISO 11140-1 para indicadores de proceso Clase A – Class 1 respectivamente
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	Si el control ha sido sometido a proceso de esterilización por vapor (121°C - 134°C indistintamente), después del proceso, el indicador químico debe haber cambiado de color de AMARILLO inicial a MARRON OSCURO - NEGRO
ETIQUETAS Y MARCAS	Cada control lleva, además del indicador, los espacios para cumplimentar los datos correspondientes a: Esterilizador, fecha de caducidad, fecha de procesado y operario.



ENSAYO	NORMA	VALOR
Clasificación	EN 867-1 - ISO 11140-1	EN Clase A - ISO Class 1
Cambio de color	EN 867-1	Amarillo a marrón
Toxicidad	EN 867-1 (5.5.2.)	No presenta
Estabilidad de color	EN 867-1 (5.5.3.)	36 meses
Soporte	-----	Cartoncillo Blanco 365 gr/m <sup>2</sup>
Adhesivo	-----	Autoadhesivo Acrílico
Diferencia de color soporte/indicador	EN 867-1 (5.5.51.)	Blanco a marrón
Cambio de color en Vapor saturado:	EN 285 (13.3.3)	
Título de Vapor > 0,9 121º C	ISO 11140-1 (8.2)	8 min.
Título de Vapor > 0,9 134º C	ISO 11140-1 (8.2)	2 min.
Cambio de color en aire caliente 140ºC	EN 867-2 (5.1.5)	Sin cambios de color
Migración	EN-867-2 (4.3.)	No presenta
Etiquetas y marcas	EN 980	Conforme
Caducidad	ISO 11140-1 (Annex 1)	5 años

**GALL-ESTERIL, S.L.**  
 Ciudad del Transporte, Nave nº 25 – Políg. Ind. Del Tambre  
 Tlf.: 981580770 // Fax: 981576013  
 Apto. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO  
 Correo electrónico: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)  
<https://gallesteril.com>