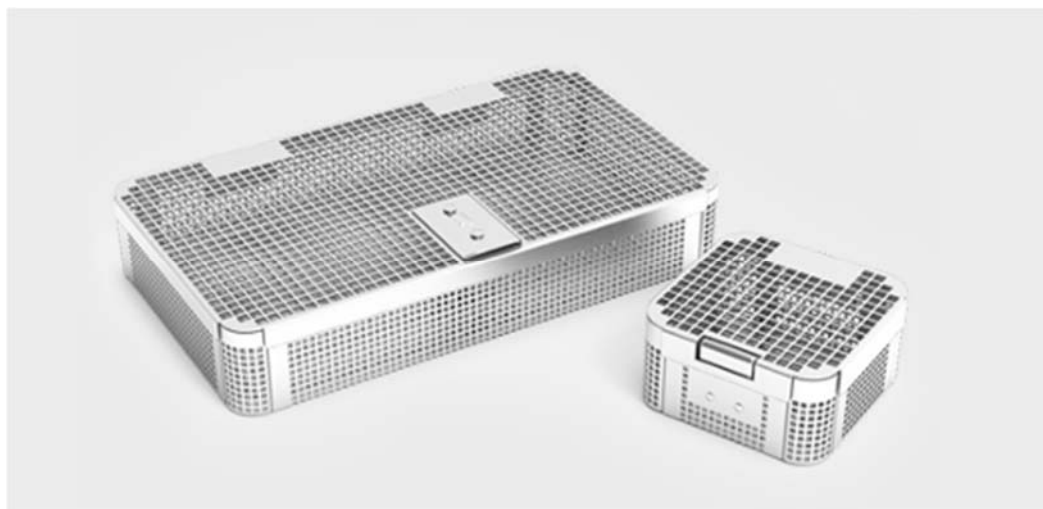


FICHA TÉCNICA

CESTA PERFORADA CON TAPA

#



Información de producto			
Descripción del artículo	Cesta perforada con tapa		
Partes	Referencia	Cesta	Sistema de cierre
Medidas (mm)	B52-BLP-10	80x80x40	Sistema de cierre a presión
	B52-BLP-11	100x80x30	Cierre plano deslizante
	B52-BLP-12	130x115x40	Cierre plano deslizante
	B52-BLP-13	130x115x60	Cierre plano deslizante
	B52-BLP-14	195x70x40	Cierre plano deslizante
	B52-BLP-15	225x130x40	Cierre plano deslizante
	B52-BLP-16	250x115x25	Cierre plano deslizante
	B52-BLP-17	250x115x40	Cierre plano deslizante
	B52-BLP-18	250x115x60	Cierre plano deslizante
	B52-BLP-19	480x115x50	Cierre plano deslizante
	B52-BLP-20	270x123x45	Cierre plano deslizante
	B52-BLP-21	270x123x65	Cierre plano deslizante
	B52-BLP-22	270x170x50	Cierre plano deslizante
	B52-BLP-23	270x170x100	Cierre plano deslizante

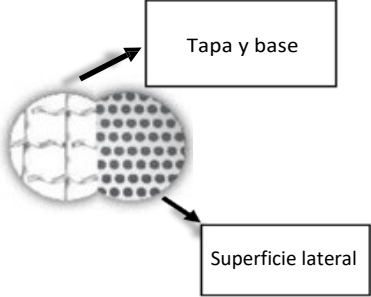
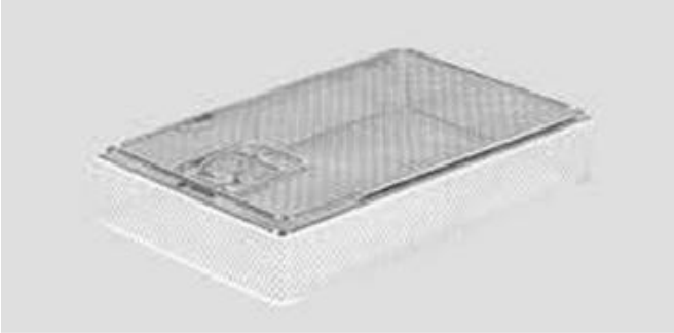
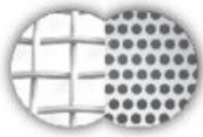
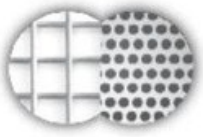
Uso previsto		Se utiliza para esterilizar instrumentos quirúrgicos de mano, combinándolo con contenedores de esterilización y textiles quirúrgicos. Los modelos de estos productos varían en función de los distintos tipos de malla, los diferentes tamaños de jaula y las especialidades quirúrgicas. Por eso se eligen en función de los productos que se vayan a introducir en su interior y de la eficacia de esterilización que se desee obtener.
Material		Acero inoxidable
Propiedades		En general, las cestas de alambre más habituales en el mercado se agrupan bajo la denominación de «modelo estándar»; también existen cestas de alambre destinadas a usos específicos. Las cestas de alambre están fabricadas en acero inoxidable y se clasifican en: estándar, ópticas, de malla fina, mini y dentales, de gran tamaño y para lavandería.
Normativa aplicable		DIN 58952-3 , TS EN 868-8, EN 285
Vida útil		N/A
Métodos de esterilización		Método: Esterilización a vapor con prevacío Temperatura: 134°C Tiempo de espera: 5 minutos Tiempo de secado: 20 minutos NOTA: Los parámetros indicados anteriormente se refieren a la esterilización del propio producto. El producto no es adecuado para esterilizar dispositivos médicos por sí solo.
Advertencias de uso		Si es necesario esterilizarlo, colóquelo en el esterilizador con la tapa abierta. De lo contrario, ¡los moldes podrían deformarse debido al vacío!

CIUDAD DEL TRANSPORTE, NAVE Nº 25 - POLÍG. IND. DEL TAMBRE
 15890 - SANTIAGO
 TLF.: 981 580 770
 INFO@GALLESTERIL.COM
 WWW.GALLESTERIL.COM

FICHA TÉCNICA

Hoja informativa
Nº de hoja informativa

: Cesta de alambre híbrida de acero inoxidable
: SCS059

Tipo 1		 Tapa y base Superficie lateral
Tipo 2		
Tipo 3		

Información de producto		
Descripción del artículo	Cesta de alambre híbrida	
Modelos	Referencia	Medidas (mm)
Tipo 1	H590.01	125x110x50
	H590.03	125x110x70
	H590.04	195x70x40
	H590.05	220x125x40
	H590.06	265x120x30
	H590.07	265x120x40
	H590.08	265x120x50
	H590.10	265x120x70
	H398.03	270x170x30
	H398.05	270x170x50

FICHA TÉCNICA

Tipo 3	H398.07	270x170x70
	H398.10	270x170x100
	H297.04	340x250x40
	H298.04	440x250x40
	H298.08	440x250x80
	H299.08	460x320x80
USO PREVISTO	Se utiliza para esterilizar instrumentos quirúrgicos manuales, combinándolo con contenedores de esterilización y textiles quirúrgicos. Los modelos de estos productos se diversifican según los diferentes tipos de malla, los distintos tamaños de jaula y las especialidades quirúrgicas. Por ello, se eligen en función de los productos que se vayan a colocar en su interior y de la eficacia de esterilización esperada.	
Material	Acero inoxidable	
Propiedades	En general, las cestas de alambre más utilizadas en el mercado se agrupan bajo el nombre de modelo estándar; también hay cestas de alambre que se utilizan en áreas específicas.	
Normativa aplicable	DIN 58952-3, TS EN 868-8, EN 285	
Vida útil	N/A	
Métodos de esterilización	Métodos de esterilización: 3x esterilización a vapor con prevacio Temperatura: 134°C Tiempo de esterilización: 5 minutos Tiempo de secado: 20 minutos NOTA: Los parámetros indicados anteriormente se refieren a la esterilización del propio producto. El producto no es adecuado para esterilizar dispositivos médicos por sí solo.	
Advertencias de uso	Si es necesario esterilizarlo, colóquelo en el esterilizador con la tapa abierta. De lo contrario, los moldes podrían deformarse debido al vacío.	