

# neodisher® IP Konz



Aditivo líquido especialmente indicado para el mantenimiento y conservación.  
Con certificado toxicológico

<b>Principales campos de aplicación</b>	Lubricante para instrumental quirúrgico, se utiliza en el último aclarado en lavadoras automáticas.
<b>Características</b>	<p>neodisher® IP Konz es un lubricante a base de parafina médica líquida que cumple con la farmacopea oficial. neodisher® IP Konz se añade en el último aclarado del lavado automático y se dispersa formando una fina capa. Los restos que puedan quedar no se acumulan en las superficies del instrumental ni se cristalizan durante el proceso de esterilización. Debido a su contenido de emulsionantes no interfiere con el vapor de la esterilización. En posteriores lavados esta película se elimina totalmente sin dejar ningún residuo.</p> <p>neodisher® IP Konz no está recomendado para esterilización por aire caliente. Neodisher IP Konz está testado bacteriológicamente, evitando totalmente la presencia de gérmenes una vez envasado.</p>
<b>Aplicación y dosificación</b>	<p>Uso en lavadoras automáticas para instrumental: 1-2 ml/l utilizando dosificadores apropiados, se añade en el último programa de aclarado de agua. El agua del último aclarado debe estar como mínimo a 50 °C.</p> <p>Para el lavado por inmersión no recomendamos el uso de neodisher® IP Konz debido al peligro de que se introduzcan gérmenes incontroladamente.</p> <p>Alternativamente, neodisher® IP Spray se puede utilizar para el tratamiento después del lavado automático. No mezclar con otros productos.</p>
<b>Datos técnicos</b>	<p>Peso específico (20°C): 0,9 gr/cm<sup>3</sup> Viscosidad (concentrado a 20°C): &lt; 50 mPas</p>
<b>Componentes</b>	<p>Según recomendaciones 89/542/EEC para detergentes: 15-30 % tensoactivos no iónicos 30% hidrocarburos alifáticos (parafina médica) conservantes</p>
<b>Marca CE</b>	neodisher® IP Konz cumple con los requerimientos de la legislación sobre aparatos médicos y con la Directiva Europea 93/42/EC
<b>Información sobre almacenaje</b>	El producto es sensible a la congelación. A temperaturas por debajo de 10°C se podrían formar agregados reversibles. Período de almacenaje: 2 años
<b>Advertencias de peligro, y recomendaciones de seguridad</b>	<p>neodisher® IP Konz no requiere clasificación según la legislación sobre preparados peligrosos de la Directiva Europea 1999/45/EC.</p> <p>Sugerimos seguir la siguiente medida de seguridad cuando se manipula la concentración: S25 Evitar el contacto con los ojos</p>
<b>Referencia y presentación</b>	Ref. 469333 – Garrafa de 5 litros.

MB 4306 GB/2-2 09/03



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre  
Tlf.: 981580770 - Fax: 981576013  
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO  
Correo electrónico: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)

