

neodisher® LM2



Detergente líquido ligeramente alcalino para lavado en baños de inmersión y ultrasonidos.

Principales aplicaciones: Lavado manual, en baños de inmersión y de ultrasonidos del instrumental quirúrgico y vidrio de laboratorio en hospitales, clínicas dentales y laboratorios médicos, industriales y biológicos. Lavado de utensilios y jaulas de animales en animalarios y laboratorios experimentales.

Características: Detergente ligeramente alcalino, compuesto por tensoactivos poco espumantes y varios intensificadores de la limpieza. **neodisher® LM 2** se aclara fácilmente y no forma espuma indeseada. Debido a la baja formación de espuma, los útiles prelavados con **neodisher® LM 2** pueden lavarse en termodesinfectoras profesionales sin necesidad de aclararlos previamente. **neodisher® LM 2** elimina los restos orgánicos, como por ejemplo sangre reseca, restos de proteínas, restos alimenticios, restos inorgánicos, cemento dental, heces, etc. Estas propiedades hacen que **neodisher® LM 2** sea el detergente ideal para el lavado manual y en ultrasonidos de instrumental quirúrgico, dental y microinstrumental. Si el vidrio de laboratorio se introduce en el autoclave antes del lavado automático, se recomienda hacerlo en un baño de **neodisher® LM 2** (3 %) y los restos de suciedad se eliminarán más fácilmente en el lavado automático. **neodisher® LM 2** no daña el vidrio, la cerámica, el acero, ni el plástico. Los objetos hechos de metales ligeros deberán ser probados previamente. El producto se puede utilizar con cualquier tipo de dureza de agua.



Aplicación y dosis: Tiempo de tratamiento: 10-30 min., la solución puede ser calentada para obtener mejores resultados.
0.5-2% para baños de inmersión y ultrasonidos
1-3 % en máquinas de limpieza de pipetas
Seguidamente la solución de neodisher® LM 2 debe ser aclarada con abundante agua
No mezclar con otros productos

Datos técnicos: Densidad: (20° C): 1.2 g/cm³
Rango pH (determinado en agua desmineralizada, 20°C) 0.5-3%: 10.3-11.7
Viscosidad (contracción, 20°C): < 10mPas

Composición: Según recomendaciones 89/542/EEC para detergentes:
< 5% tensoactivos anfóteros, tensoactivos aniónicos
15-30 % fosfatos

CE neodisher® LM 2 cumple con los requisitos de la legislación de aparatos médicos según la directiva europea 93/42/EC

Almacenaje: Este producto es susceptible a la congelación. Si se almacena según recomendación tiene una vida útil de cuatro años.

Ref y presentación: 483544 – Caja de 12 botellas de 1 litro.



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 – Fax: 981576013
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com

