

# neodisher® MediClean forte



## Detergente con agentes tensoactivos para aplicación en termodesinfectadoras

### Principales aplicaciones:

neodisher® MediClean forte es un detergente básico no mineral. Los restos de sangre seca, desnaturalizada y endurecida por los desinfectantes se eliminan con neodisher MediClean forte a la vez que se protege el material. neodisher® MediClean forte contiene agentes tensoactivos que eliminan la tensión superficial de la solución limpiadora.

Acero inoxidable, lentes, vidrio, plásticos comunes así como los materiales de los utensilios de anestesia son resistentes a las soluciones de aplicación de neodisher® MediClean forte. Se puede tratar el aluminio anodizado sin que neodisher® MediClean forte resulte abrasivo.

### Aplicación y dosis:

Para la limpieza mecánica: 0,2-1,0 %, (2-10 ml/l.) a 40-60°C.

Para la limpieza mecánica de endoscopios flexibles: 0,5% (5 ml/l.) a 36-55°C

Baños de inmersión o baños de ultrasonidos: 2 - 5 % ( 20 – 50 ml/l.)

Renovar la solución de inmersión al menos una vez al día. Deben aclararse completamente los materiales antes de usarse. No mezclar con otros productos.

### Datos técnicos:

Gravedad específica (20°C): 1.1 g/cm<sup>3</sup>

valor pH (determinado en agua desionizada , 20°C) 0.5-1.0%: 10,5 – 10,9

Viscosidad (concentración, 20°C): <50 mPas

Factor Titulación: 0.76 (de acuerdo al método especial de titración de neodisher® MediClean forte).

### Ingredientes:

Según recomendaciones 648/2004/CE para detergentes:

< 5% de agentes tensoactivos aniónicos, policarboxilatos

5-15% NTA (sal)

Otros componentes: enzimas y conservantes.

### Marca CE:

neodisher® MediClean forte cumple los requisitos de legislación para productos médicos y la Directiva Europea 93/42/EC.

### Información de almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco, proteger de la congelación (0 a 25 °C).  
Tiempo de almacenamiento: 2 años.

### Referencia y presentación:

475433 – garrafa de 5 litros



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre  
Tlfnos.: 981580770 - Fax: 981576013  
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO  
Correo electrónico: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)

