

neodisher® medizym



Detergente líquido **enzimático de pH neutro para lavado manual o por ultrasonidos.**

Principales aplicaciones:

Limpieza manual de instrumental quirúrgico, material de anestesia, endoscopios flexibles, contenedores y otros utensilios médicos.

Características:

neodisher® medizym es un agente de limpieza de pH neutro con enzimas, tensoactivos y sustancias coadyuvantes. neodisher® medizym elimina los restos de sangre reseca, al mismo tiempo que protege el material.

neodisher® medizym puede usarse con acero inoxidable, acero de herramientas, metales ligeros, vidrio, plásticos, todo el material de anestesia y los endoscopios flexibles.



Aplicación y dosis:

Lavado automático de instrumental: 0.2 - 1% (2-10ml/l) 40-50 °C

Lavado automático de endoscopios: 0,5 % (5 ml/l)

Lavado manual:

- Baños de inmersión: 0,5-2 %,

- Baño ultrasónico: 0,5 – 2 %

La solución de limpieza puede opcionalmente calentarse hasta los 45 °C

La solución de neodisher® medizym debe renovarse diariamente y debe ser aclarada completamente de la superficie del instrumental.

Datos técnicos:

Densidad (20°C): 1.0 g/cm³

Valores pH (determinado en agua desionizada, 45 °C) 0.3- 2 % : 7.5 - 7.8

Viscosidad (Concentrado, 20 °C): < 10 mPas

Composición:

Componentes acordes a la Directiva Europea 648/2004 sobre detergentes

Enzimas, < 5% tensoactivos aniónicos, conservantes

Marca CE:

neodisher® medizym cumple los requisitos de la ley sobre productos médicos y las directrices que se derivan de la directiva 93/42/EWG sobre productos médicos

Información Ecológica:

neodisher® medizym se compone de materiales orgánicos biodegradables

Almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco, proteger de la congelación. Tiempo de almacenamiento: 2 años

Advertencias de peligro, y recomendaciones de seguridad

neodisher® medizym no está clasificado como preparado peligroso según la directiva 1999/45/EC.

Ref. y presentación:

468944 – Caja de 12 botellas de 1 litro.



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 – Fax: 981576013
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com

