



neodisher® PreStop

Nuevo



Espuma para el tratamiento previo del instrumental quirúrgico

Aplicación:

- Spray espumoso anticorrosivo para pulverizar sobre el instrumental quirúrgico inmediatamente tras su uso en quirófano.

Efectividad:

- Inhibidor de la corrosión: impide la corrosión en instrumental de acero inoxidable provocada por residuos adheridos o soluciones salinas.
- Comienza el proceso de limpieza sobre el instrumental.
- Evita que los residuos se resequen sobre la superficie del instrumental.

Características especiales:

- Impide la fijación de residuos de la intervención en el instrumental manteniéndolo húmedo.
- Facilita significativamente la limpieza automática del instrumental quirúrgico.
- Inhibe el crecimiento de microorganismos durante el periodo de contacto (bacteriostático).

Aplicación y dosificación:

Pulverizar neodisher PreStop directamente sobre el instrumental en el contenedor de instrumental contaminado hasta que se quede completamente cubierto. Mantener el contenedor cerrado. Una vez tratado con neodisher PreStop el instrumental se conserva durante 72 horas. Continuar con el proceso de limpieza y desinfección de forma habitual.

Consejos de uso:

- Solo para uso profesional.
- Aplicar utilizando el pulverizador especial facilitado.
- No mezclar con otros productos.
- Tener en cuenta las recomendaciones del fabricante del instrumental sobre el procesamiento del material según normas DIN EN ISO 17664.

Datos técnicos:

| | |
|----------|---------------------------------|
| pH | Aprox. 9,5 (concentrado, 20 °C) |
| Densidad | 1,04 g/cm ³ (20 °C) |

Composición:

< 5 % tensoactivos aniónicos y anfotéricos, enzimas y conservantes

Marcado CE:

neodisher PreStop cumple las exigencias de la Directiva 93/42/CE, anexo I sobre productos médicos.

Almacenamiento:

Almacenar a una temperatura entre 0 °C y 25 °C. Mantener el envase bien cerrado. Con un almacenaje adecuado se puede usar durante 2 años. Fecha de caducidad, ver este símbolo

Consejos y medidas de seguridad:

Neodisher Pre-Stop no está clasificado como preparado peligroso de acuerdo a la normativa (CE) 1272/2008.

Más información sobre seguridad y medio ambiente en las hojas de seguridad de la Unión Europea. Las podrá encontrar en la página web www.drweigert.es bajo la sección "Servicios/descargas".

Referencia y presentación:

Ref.: 449347 - Caja de 12 botellas de 0,75 l.



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre
Tlf.: 981580770 - Fax: 981576013
Aptdo. Correos nº 196 -15890 -SANTIAGO
Correo electrónico: info@gallesteril.com