



## Aditivo neutralizante líquido para uso en lavadoras automáticas, sin fosfatos

### **Principales campos de aplicación**

Indicado para utilizar en el aclarado del ciclo de lavado seguidamente de un agente de limpieza alcalino. También se utiliza como agente ácido para el prelavado en lavadoras automáticas de instrumental quirúrgico, utensilios de anestesia, vidrio de laboratorio e instrumental general de uso hospitalario, farmacias o laboratorios.

### **Características**

neodisher® Z está libre de fosfatos y tensoactivos, por lo tanto se puede utilizar en laboratorios de examinación minuciosa de análisis de agua y en todos aquellos análisis sensibles a los fosfatos, ácidos fosfóricos, componentes nitrogenados y tensoactivos que pudieran interferir con las operaciones.

neodisher® Z contiene menos de 10 ppm  $P_2O_5$

neodisher® Z se utiliza como neutralizante de agentes de limpieza alcalinos en la limpieza mecánica de instrumental médico en los hospitales. neodisher® Z puede también ser utilizado como agente ácido de limpieza para retirar incrustaciones y residuos tales como cal.

neodisher® Z ofrece un alto grado de protección de los materiales no, daña los materiales delicados. Debe prestarse atención a la resistencia al ácido de los materiales que van a ser aclarados, máquina, tuberías, y cualquier sistema de desagüe.

### **Aplicación y dosificación**

Uso en lavadoras automáticas:

Como agente de limpieza: 2-5 ml/l a 40-60 °C utilizando sistemas apropiados de dosificación.

Como Agente neutralizante: 1-2 ml/l utilizando dosificadores apropiados

neodisher® Z se utiliza para neutralizar residuos alcalinos de detergentes, donde no puedan quedar residuos de fosfatos o tensoactivos.

La solución de neodisher® Z deberá ser aclarada con abundante agua. No mezclar con otros productos.

### **Datos técnicos**

Peso específico (20°C): 1.2 gr/cm<sup>3</sup>

pH: (determinado en agua desionizada a 20°C) 1-5 ml/l: 3,0-2.6

Viscosidad (concentrado a 20°C): < 10 mPas

Factor de Titulación: 0.35 (según escala de Titulación neodisher)

### **Componentes**

Según recomendaciones 89/542/EEC para detergentes:

Ácidos orgánicos

### **Marca CE**

neodisher® Z cumple con los requerimientos de la legislación sobre aparatos médicos y con la Directiva Europea 93/42/EC

### **Información sobre almacenaje**

El producto es sensible a la congelación por debajo de -3 °C. Período de almacenaje: 4 años



Ciudad del Transporte, Nave 25 - Políg. Ind. Del Tambre  
Tlf.: 981580770 – Fax: 981576013  
Aptdo. Correos nº 196 – 15890 – SANTIAGO  
Correo electrónico: [info@gallesteril.com](mailto:info@gallesteril.com)



**DR. WEIGERT**